



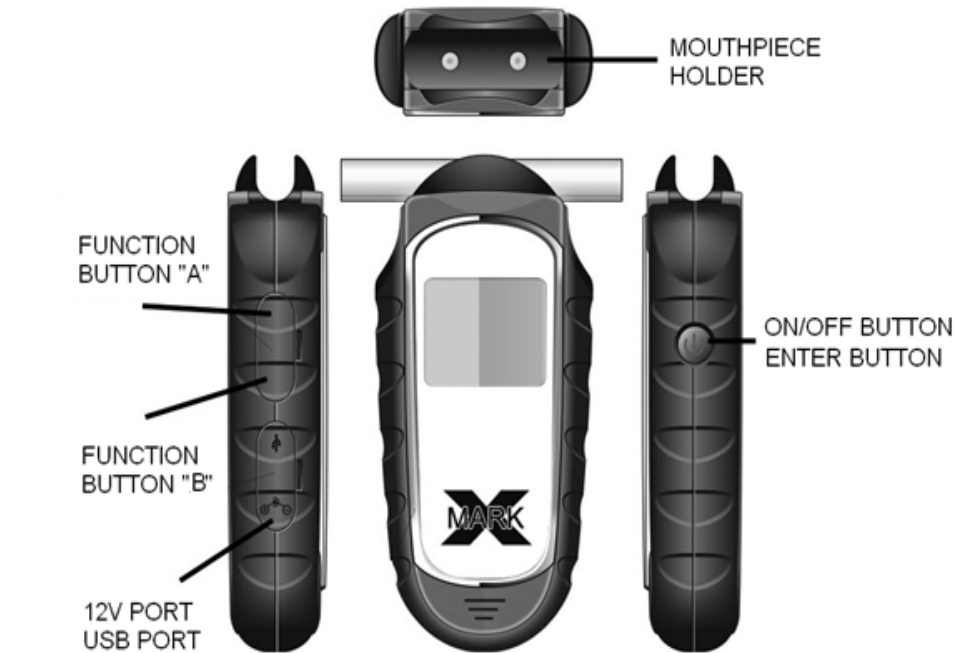

Mouthpiece Holder – Iemuša ievietošanas vieta
Function Button „A” – Funkcijas izvēle „A”
Function Button „B” – Funkcijas izvēle „B”
On/Off Button and Enter Button – Ieslēgt/izslēgt, apstiprināt
12V Port USB port – 12 V ieeja, USB savienojums

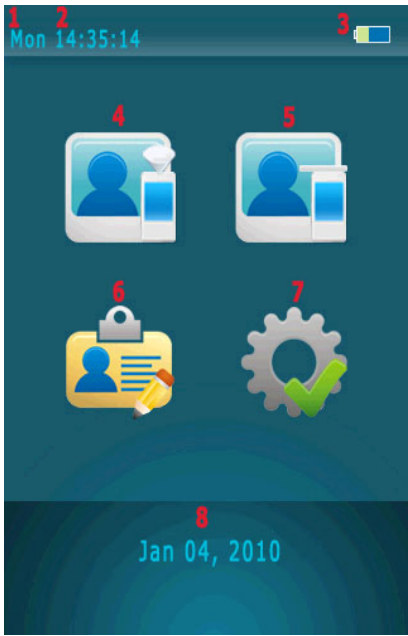

1	Diena	5	Mērījums ar kontakta iemuti
2	Laiks	6	Mērījumu vēsture
3	Baterijas līmenis	7	Iestatījumi
4	Bezkontakta mērījums	8	Datums

Atpakaļ/atcelt

Uz priekšu/apstiprināt

Galvenā

Izprintēt

Atkārtot mērījumu

izvēlne

Mērījumu veikšana

Ievērojiet labi! Jūsu alkometra izgatavošanā izmantots visjaunākais mūsdienu alkohola sensors, kam piemīt ļoti augsta selektivitāte un jutīgums. Gadījumā, ja neesat alkometru ilgāku laiku izmantojuši, sensora augstā jutīguma dēļ, pirms testa veikšanas ieteicams ļaut alkometram veikt iesildīšanās ciklu un, ja iespējams, vienu reizi tajā iepūst, nepievēršot uzmanību rezultātam. To neizdarot, pirmajā iepūšanas reizē varat iegūt lielāku rādījumu, kas neatbilst patiesībai.

Nepieciešamie apstākļi, lai veiktu mērījumu

- ✓ Mērījumus drīkst veikt pie temperatūras -10°C līdz 50°C. Lietojot alkometru šajās temperatūras robežās, samazinās kondensācijas iespējamība.
- ✓ Lai izvairītos no neprecīziem un neobjektīviem mērījumiem, mērījumu var veikt ne ātrāk kā 20 minūtes pēc pēdējās alkohola devas.



Standarta mērījums ar kontakta iemuti

1. Ievietot iemuti tam paredzētajā vietā,
2. Ar pogām “Function Button A&B” izvēlieties ikonu “Standarta tests” un nospiediet pogu “Enter”
3. Kad ekrānā redzams “Please Blow”, ievēliet elpu un pūstiet līdz pārtrauc skanēt skaņas signāls un/vai ekrānā atlikušais pūšanas ilgums (procentuāli) sasniedzis atzīmi „0”.
4. Mērījuma rezultāts ir redzams uz ekrāna
5. Ja ierīcei ir pievienots printeris, izvēlieties , lai izprintētu rezultātu.
6. Lai veiktu jaunu mērījumu, izvēlieties .
7. Ja netika mērījums netika veikts ilgāk par 30 sekundēm, mērījuma veicējs var izvēlēties “Refuse”, lai apstiprinātu, ka lietotājs atteicies veikt testu; vai izvēlēties “Test Again”, lai atļautu lietotājam veikt atkārtotu mērījumu.
8. Ja lietotājam neidzevās veikt atbilstošu mērījumu, mērījuma veicējs var izvēlēties “Discontinue” lai apstiprinātu; vai izvēlēties “Test Again”, lai atļautu lietotājam veikt atkārtotu mērījumu.
9. Pasīvais mērījums var tikt veikts izvēloties “Manual”, laikā kad lietotājs veic mērījumu.



Bezkontakta mērījuma veikšana

1. Pievienojiet bezkontakta iemuti tam paredzētajā vietā.
2. Ar pogām “Function Button A&B” izvēlieties ikonu “Bezkontakta mērījums” un nospiediet pogu “Enter”
3. Kad ekrānā redzams “Please Blow”, ievēliet elpu un pūstiet līdz pārtrauc skanēt skaņas signāls.
4. “Alcohol Detected” vai “No Alcohol” tiek atspoguļots uz displeja.
5. Pasīvais mērījums var tikt veikts izvēloties “Manual”, laikā kad lietotājs veic mērījumu.
6. Lai veiktu jaunu mērījumu, izvēlieties .
7. Ja redzams “Alcohol Present”, izmantojiet kontakta iemuti, lai veiktu “Standarta mērījumu”.

PIEZĪME: Bezkontakta mērījuma veikšana tiek lietota, lai ātri pārbaudītu alkohola esamību/neesamību izelpā. Lai veiktu precīzu mērījumu, izmantot standarta mērījumu ar kontakta iemuti.

PIEZĪME: Bezkontakta mērījuma rezultāti nevar tikt izprintēti vai saglabāti.



Test Record

1. Atmiņā var tikt saglabāti vairāk kā 10000 ieraksti.
2. Mērījumu var izprintēt, nospiežot uz  ikonas.
3. Izmantot  vai , lai apskatītu iepriekšējo/nākamo ierakstu.



Iestatījumi

1. **Date & Time**
Uzstādīt laiku un datumu
Izvēlieties “Update” lai apstiprinātu.
2. **Automatically Off**
 - i. Uzstādiet laika limitu, kad ierīce automātiski izslēgsies
 - ii. Izvēlieties , lai apstiprinātu
3. **Print**
 - i. Izvēlieties “Auto Print”, lai automātiski izprintētu mērījumu pēc katra testa.
 - ii. Izvēlieties cik izdrukas kopijas būs nepieciešamas
 - iii. Izvēlieties , lai apstiprinātu
 - iv. Ja nepieciešams, lai uz izdrukas tiek parādīts pēdējās kalibrēšanas datums, izvēlieties „Cal.”.
4. **Cali**
 - i. Gadījumā, ja uz displeja redzams uzraksts “Calibration Needed”, vēršieties “ROVICO LATVIA”, lai nodotu ierīci uz kalibrēšanu.
 - ii. Lai veiktu kalibrēšanu, nepieciešams ievadīt paroli, lai nodrošinātu kalibrēšanu profesionālā laboratorijā, tiesīgajiem pārstāvjiem.
5. **Advanced Setting**
 - i. Drošības dēļ, papildus iestatījumi pieejami alkometra oficiālajam pārstāvim.
 - ii. Nepieciešama parole
 - iii. Lai veiktu izmaiņas papildus iestatījumus, griezties pie “ROVICO LATVIA”.